


BRUKSANVISNING

TILL DIG SOM FÅTT BUFOMIX EASYHALER

Denna folder vänder sig till dig som har fått Bufomix Easyhaler för behandling av astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

VAD ÄR BUFOMIX EASYHALER?

Bufomix Easyhaler är en pulverinhalator för behandling av astma eller KOL. Den är enkel att använda och innehåller inga drivmedel. Du andas in pulvret i lungorna genom munstycket på inhalatorn. Bufomix Easyhaler är försedd med ett tydligt räkneverk som visar hur många doser som finns kvar.

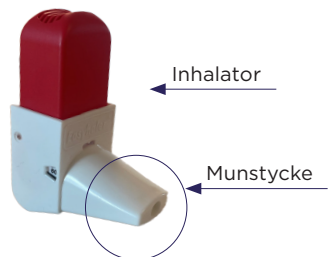

Skydd för munstycke (skyddshuv)
Kontrollera att skyddet (skyddshuv) täcker munstycket på Bufomix Easyhaler. Skyddet förhindrar att inhalatorn aktiveras.




Skyddsodral
Du kan använda din Bufomix Easyhaler med eller utan skyddsodral. Inhalatorn kan vara kvar i fodralet när du inhalerar.




SÅ HÄR LADDAR DU OCH TAR EN DOS MED BUFOMIX EASYHALER

Det är viktigt att du läser igenom följande anvisningar noga.

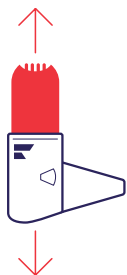


1. SKAKA

- Ta bort skyddet.
- Håll inhalatorn upprätt och skaka den 3 till 5 gånger.
- *Viktigt att komma ihåg: Det är viktigt att hålla inhalatorn i upprätt läge. Om du av misstag klickar på Bufomix Easyhaler när du skakar inhalatorn, töm ut pulvret ur munstycket enligt instruktioner.*

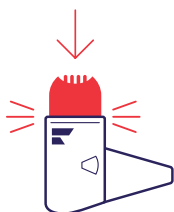

2. KLICKA

- Håll Bufomix Easyhaler upprätt mellan pekfingret och tummen.
- Tryck en gång tills du hör ett klick och låt den klicka tillbaka. Detta laddar en dos.
- Tryck endast en gång.
- *Viktigt att komma ihåg: Inhalatorn kommer inte klicka om skyddet fortfarande är på. Klicka bara en gång. Om du av misstag klickar på inhalatorn mer än en gång, töm ut pulvret ur munstycket enligt instruktioner. Klicka för att mata dosen innan du inhalerar, inte samtidigt. Fortsätt hålla inhalatorn upprätt när du klickar och när du inhalerar dosen. Om du lutar den kan pulvret falla ut innan du hinner inhalera det.*

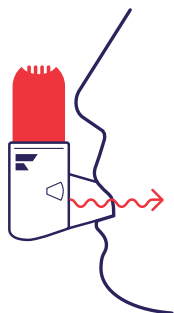

3. INHALERA

- Fortsätt hålla inhalatorn upprätt.
- Andas ut normalt.
- Placera munstycket i munnen mellan tänderna och slut läpparna tätt runt munstycket.
- Gör en kraftig och djup inandning.
- Ta bort inhalatorn från munnen, och andas därefter ut normalt.

Om du behöver ta en andra dos, upprepa steg 1-3 Skaka-Klicka-Inhalera.

När du har använt inhalatorn:

- Sätt tillbaka skyddet på munstycket för att förhindra dosering av misstag.
- När du har tagit dosen, skölj munnen med vatten och spotta ut det.

BRUKSANVISNING

SVENSKA



NÄR VET JAG ATT INHALATORN ÄR TOM?

Bufomix Easyhaler har ett tydligt räkneverk som visar hur många doser som finns kvar. Det räknar ner vid var femte dos och siffror visas i intervaller om 10 doser. När siffrorna visas med röd bakgrund finns 20 doser kvar. Byt till ny Bufomix Easyhaler när räkneverket visar 0, även om du fortfarande kan se pulver i kontrollfönstret på baksidan av Bufomix Easyhaler.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING AV EASYHALER

Efter att laminatpåsen öppnats är Bufomix Easyhaler hållbar i 4 månader.

Bufomix Easyhaler ska förvaras i rumstemperatur och skyddas mot fukt. Den tillhandahålls med eller utan fodral. Fodralet kan användas som ett extra skydd för inhalatorn (för mer information se bipacksedeln i förpackningen).

UNDERHÅLLSBEHANDLING/VIDBEHOVSBEHANDLING:

BUFOMIX EASYHALER



Bufomix Easyhaler innehåller två olika läkemedel: budesonid och formoterol. Budesonid tillhör läkemedelsgruppen glukokortikoider och används som underhållsbehandling/vidbehovsbehandling. Den minskar och förebygger svullnad och inflammation i lungorna. Formoterol vidgar luftrören och gör det lättare att andas. Effekten av formoterol inträder inom 1-3 minuter efter inhalation och varar i genomsnitt 12 timmar efter en engångsdos. Bufomix Easyhaler finns i tre olika styrkor med budesonid/formoterol: 80/4,5 mikrogram, 160/4,5 mikrogram och 320/9 mikrogram.



Instruktionsfilm om hur du använder Bufomix Easyhaler hittar du på www.medicininstruktioner.se (använd gärna QR-koden), www.fass.se

Följ alltid den behandlingsordination som du fått. Läs noga igenom den bipacksedel som finns i förpackningen. Har du frågor eller funderingar om din behandling bör du tala med din läkare eller sjuksköterska. För mer information se www.fass.se för allmänheten. Släng aldrig mediciner bland hushållsavfall. Tänk på att skydda miljön. Apoteket tar emot överblivna läkemedel.

Bufomix Easyhaler (budesonid/formoterol) **Beredningsform:** Inhalationpulver **Verksam substans:** budesonid/formoterol. **Användningsområde:** Bufomix Easyhaler är ett läkemedel för behandling av av astma hos vuxna och ungdomar i åldern 12-17 år, samt behandla symtom på kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) hos vuxna från 18 års ålder. **Försiktighet och varningar:** Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Bufomix Easyhaler om du har diabetes, har en lunginfektion, har högt blodtryck eller om du någonsin har haft hjärtproblem (inkluderande ojämn hjärtrytm, väldigt snabb puls, förträngning i artärerna eller hjärtsvikt), har problem med sköldkörteln eller med binjurarna, har låga halter kalium i blodet, har svåra leverproblem. Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbingar. Skölj munnen efter du inhalerat din dos för att undvika svampinfektion i munnen. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Använd inte Bufomix Easyhaler om inte din läkare råder dig till detta. Om du blir gravid under tiden du använder Bufomix Easyhaler, ska du inte sluta använda Bufomix Easyhaler men omedelbart kontakta din läkare. **Ansvarigt företag:** Orion Pharma AB, www.orionpharma.se Läs alltid bipacksedeln noga.